

清创凝胶

产品简介

部份伤口上会覆盖坏死性组织或黑痂腐肉组织，这些腐坏组织常导致伤口难以清洁并造成复原缓慢，如何完善的进行伤口清创为一重要课题。远东开发了新型态的清创凝胶，此为一透明、无菌、无定形的高含水量凝胶，可帮助伤口加速进行自体清创，并维持伤口于一适宜的湿润环境，保护新生肉芽组织；针对低至中度渗液伤口可吸收少量分泌液。清创凝胶亦可隔离外界细菌直接接触伤口，促进伤口愈合。



图一、清创凝胶，尖嘴式软管设计可深入腔穴型伤口，操作简易

伤口状态	第二层敷料	更换频率
坏死性组织	薄膜式敷料(如防水透湿膜)	每天更换
黑痂腐肉组织	吸收性敷料(如泡棉敷料)	每天更换
洁净肉芽新生组织	薄膜或 收性敷料	每三天更换

图二、建议使用伤口型态及第二层敷料

产品特点

- ✓ 保持湿润，加速愈合—含水量高，帮助黑痂自然移除，维护新生组织湿润修复，促进愈合。
- ✓ 减低疼痛感—高含水量凝胶可降低伤口温度，保护暴露的神经末梢，舒缓疼痛。
- ✓ 适用各种部位—无定形凝胶态，可妥善涂抹包覆各种形状伤口。
- ✓ 易于使用—尖嘴式软管包装设计，可单手操作，减低接触感染风险。

应用范围

- 低至中度渗出液伤口
- 一级及二级烧烫伤伤口
- 开放性溃疡
- 压疮