

## 清創凝膠

### 產品簡介

部份傷口上會覆蓋壞死性組織或黑痂腐肉組織，這些腐壞組織常導致傷口難以清潔並造成復原緩慢，如何完善的進行傷口清創為一重要課題。遠東開發了新型態的清創凝膠，此為一透明、無菌、無定形的高含水量凝膠，可幫助傷口加速進行自體清創，並維持傷口於一適宜的濕潤環境，保護新生肉芽組織；針對低至中度滲液傷口可吸收少量分泌液。清創凝膠亦可隔離外界細菌直接接觸傷口，促進傷口癒合。



圖一、清創凝膠，尖嘴式軟管設計可深入腔穴型傷口，操作簡易

傷口狀態	第二層敷料	更換頻率
壞死性組織	薄膜式敷料(如防水透濕膜)	每天更換
黑痂腐肉組織	吸收性敷料(如泡棉敷料)	每天更換
潔淨肉芽新生組織	薄膜或 收性敷料	每三天更換

圖二、建議使用傷口型態及第二層敷料

## 產品特色

- ✓ 保持濕潤，加速癒合—含水量高，幫助黑痂自然移除，維護新生組織濕潤修復，促進癒合。
- ✓ 減低疼痛感—高含水量凝膠可降低傷口溫度，保護暴露的神經末梢，舒緩疼痛。
- ✓ 適用各種部位—無定形凝膠態，可妥善塗抹包覆各種形狀傷口。
- ✓ 易於使用—尖嘴式軟管包裝設計，可單手操作，減低接觸感染風險。

## 應用範圍

- 低至中度滲出液傷口
- 一級及二級燒燙傷口
- 開放性潰瘍
- 壓瘡